

lätta lyft

LL65200 Tvåspann – lyftremmar inkl karbinhakar – avsedda att kopplas till personlyftar med två krokar och kombineras med bärsitsen/lyftselen Lätta Lyft. Hakarna är av bästa kvalitet, används av bergsklättrare. Information om vilka kombinationer som är godkända finns i **Kombinationer lyftselar – personlyftar nr 12, 1 maj – 30 april 2009**.




Så här används Tvåspannet

Justera sittställningen genom att flytta hakarna upp eller ned i öglorna som finns på remmarna. Öglorna i toppen sätts fast i bygelns krokar. Om du vill sitta rak i ryggen eller luta bakåt beror på vilka öglor du väljer. Prova dig fram till rätt sittställning. Det ska kännas säkert och skönt.

Öglorna ska sitta utåt på Tvåspannet

i förhållande till kroppen. Den släta sidan ska ligga inåt. För att inte remmarna bak ska trycka finns skydd som kan flyttas i höjded. När höjd och lutning är inställda och sittställningen känns bekväm ska **remmarna helst hänga kvar i personlyften**. Då är det enkelt att koppla ihop Tvåspannet med handtagen i Lätta Lyft bärsits/lyftsele som du redan sitter i.

Karbinhakarna sätts fast i lyftselens handtag med öppningen på haken framåt. De sätts på utifrån och in. Detta är viktigt, annars vrider sig remmarna inne i skydden.

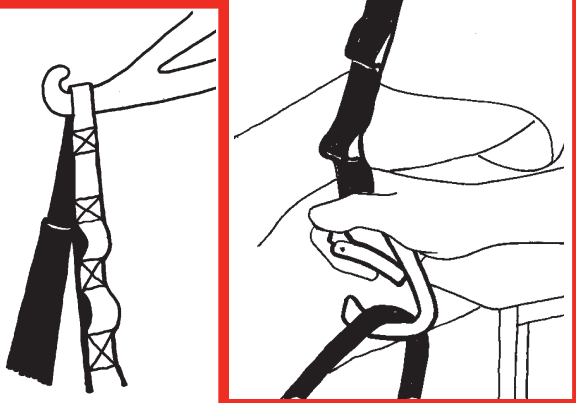

Tvåspannet används till personlyftar med byglar som har två krokar.

Mer information finns att hämta under respektive rubriker på **www.lattalyft.se** eller ring Svart på Vitt AB, 0302-468 40 Ulla Lindeberg.

Garanti 2 år från fakturadatum. Kontrollera att Tvåspannet inte får några defekter. Om skador uppstår ska remmarna bytas ut. Produkten är testad hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. CE-märkt. Tillverkas i Sverige.

Svart på Vitt Reklam och Design AB

Box 4067 443 12 Gråbo Telefon 0302-468 40 Fax 0302-468 49

office@spvrekam.o.se www.lattalyft.se